

Оссеоденсификация

Versah Протокол системы ® C-Guide®



Versah®
Guided Surgery Protocol

Обзор: Система направленной хирургии Versah® – это инновационная система, которая обеспечивает адекватное орошение, правильную визуализацию расширения/подготовки остеотомии, свободу перемещения сверла Densah® и возможность точного управления несколькими участками с разной глубиной и диаметром подготовки.



Шаг 1:
Визуализация: Получите КЛКТ (конуснолучевую компьютерную томографию) и клинические слепки обозначенных челюстей пациента.

Шаг 2:
Планирование лечения: Свяжитесь с сертифицированной лабораторией Versah®. Отправьте в лабораторию КЛКТ-скан и клинические слепки. Для получения списка всех сертифицированных лабораторий Versah® посетите: versah.com/guided-surgery-system

Шаг 3:
Назначьте сессию планирования случая с вашей лабораторией, чтобы определить окончательный диаметр имплантата, угол наклона, расположение втулки C-Guide® и последовательность сверления с использованием необходимых сверл Densah®.

Шаг 4:
Выберите подходящую сборку G-Stop®. Закрепите вертикальный калибр на назначенной канавке сверла Densah®. Калибр должен свободно вращаться (рисунки 1, 2, 3). Пример:

- Большой (L) вертикальный калибр G-Stop®,
 – Ключ (L) G-Stop®,
 – Втулка (L) C-Guide®.

Step 3



Figure 1

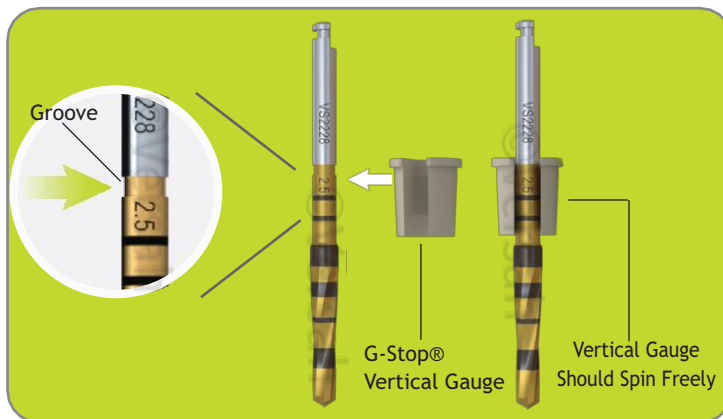


Figure 2



Figure 3

Шаг 5:

Следуйте предложенному протоколу сверления для имплантационной системы Densah®. Используйте ключи G-Stop® поэтапно, например, если расстояние между втулкой и костью составляет 2 мм (см. Шаг 3), начните с ключа G-Stop® (5 мм), чтобы разметить остеотомию и задать начальную траекторию.

Замените ключ (5 мм) на ключ (10 мм) и повторяйте с регулярными интервалами до достижения конечной длины. Повторите этот процесс с каждым сверлом Densah®. Ваш ключ G-Stop® должен соответствовать втулке C-Guide®.



Рисунок 4 (Хирургические ключи)
Пример (желаемая конечная длина 13 мм):

- Конусное пилотное сверло с ключами (5 мм, затем 10 мм, 13 мм)
- VT1525 с ключами (5 мм, затем 10 мм, 13 мм)
- Vt2535 с ключами (5 мм, затем 10 мм, 13 мм)

Определение размеров системы направленной хирургии Versah®

Доступные Размеры





S
Placement up to 3.25 mm Implant

M
Placement up to 4.3 mm Implant

L
Placement up to 5.3 mm Implant

XL
Placement up to 6.2 mm Implant




Совместимость Сверл Densah®

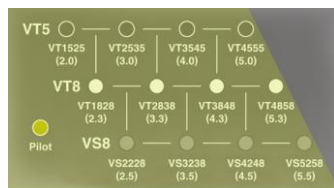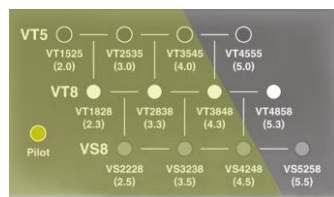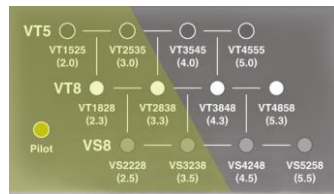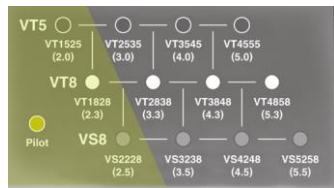

Вертикальный калибр G-Stop® + ключ



Втулка C-Guide®

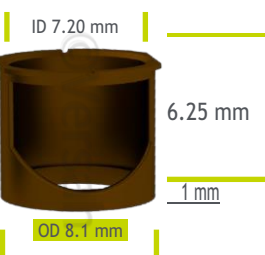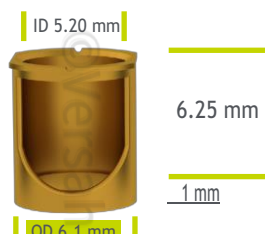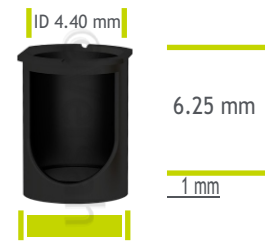

Scan for more information

